



COMS[®] One

Carte d'Instruction


Ref.: 01.0000



Le COMS One carte d'instruction ne remplace pas le mode d'emploi. Pour des informations sur l'utilisation prévue, les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions, veuillez vous référer au mode d'emploi fourni avec l'appareil COMS One ou disponible à l'adresse suivante: <http://www.piomic.com/our-product>

APERÇU DU DISPOSITIF MÉDICAL

Un traitement dure **16 minutes**. Afin d'atteindre l'effet favorisant la guérison de plaies, cet effet étant scientifiquement prouvé, il faut appliquer le traitement **2 à 3 fois par semaine**, et il faut le répéter sur une période de deux mois.

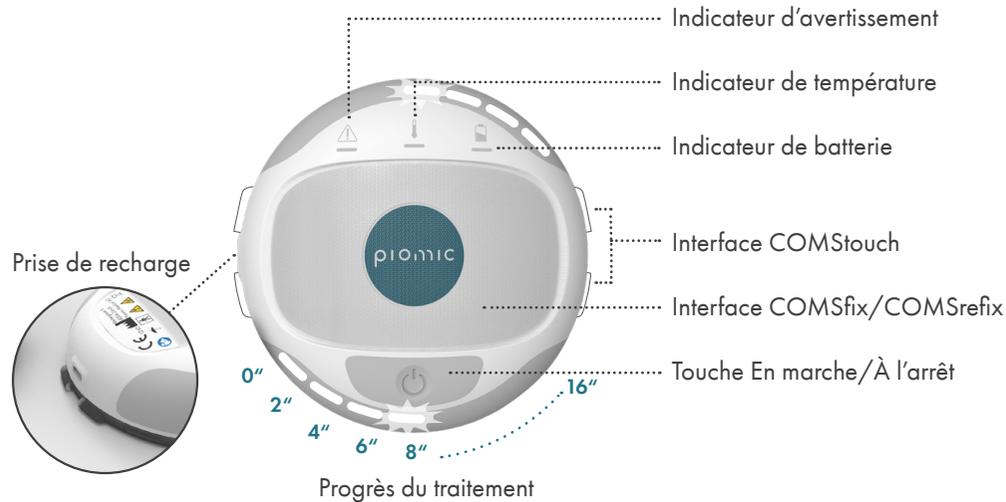

TÉMOINS DE CONTRÔLE



Dispositif médical prêt pour traitement (constante)
Traitement en pause (clignotant)



Batterie pleine



Batterie faible



Batterie vide (recharger)



Le dispositif médical est en surchauffe (attendre)



Erreur de dispositif (mettre à l'arrêt et remettre en marche)




Traitement terminé (avec succès)




Traitement interrompu à cause d'une erreur


EFFECTUER UN TRAITEMENT

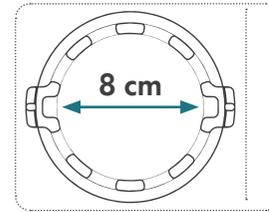


1. Vérifiez si la taille maximale de la plaie se trouve à l'intérieur du diamètre du COMStouch.

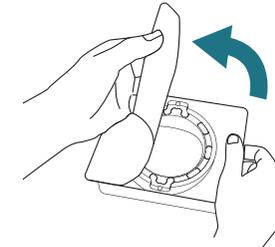


2. Ouvrez délicatement l'emballage stérile sans toucher le COMStouch.

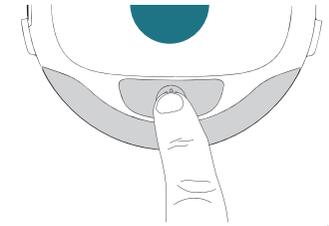


3. Appuyez sur la touche pendant au moins 3 secondes. Dispositif médical est prêt:

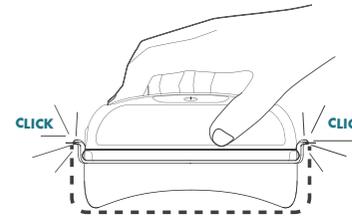


4. Connectez le dispositif médical avec COMStouch.

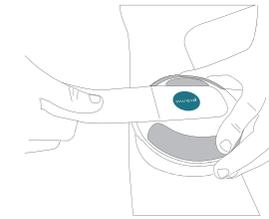


5. Fixer le dispositif médical au patient avec l'attache (COMSfix ou COMSrefix). Logo sur logo.

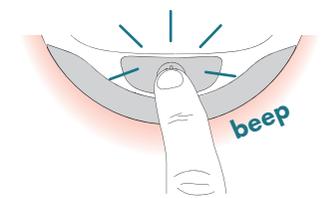


6. Appuyez sur la touche et le traitement commence. Pour interrompre la thérapie appuyez la touche de nouveau.

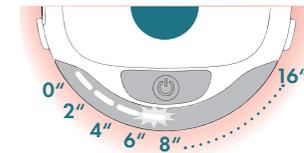

7. Le progrès du traitement est indiqué par les barres de progression clignotantes. Chaque barre individuelle représente 2 minutes.

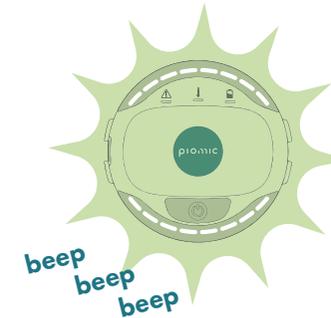

8. Traitement terminée avec succès. Pour éteindre, appuyez sur la touche pendant au moins 3 secondes.

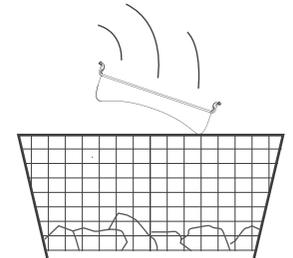

9. Retirez l'attache et le dispositif médical du patient, et éliminez le matériel à usage unique (COMStouch & COMSfix)

Piomic Medical AG
Reitergasse 6
8004 Zurich

E-Mail: info@piomic.com
www.piomic.com

100.0063/2020-05/REV A